

# Instructions de nettoyage du bocal d'aspiration



1

Eteindre l'appareil et évacuer le vide.



2

Déconnecter la prise d'alimentation de l'appareil.



3

Déconnecter les tuyaux du bocal et de l'appareil.



4

Retirer soigneusement le couvercle et vider le contenu du bocal.

*Le bocal doit être vidé et nettoyé après chaque usage.*



5

Retirer la cartouche et le tube de connection et mettez les de côté.

*Ne pas retirer la bille plastique du couvercle afin d'éviter tout risque d'étouffement.*




**La cartouche filtrante NE DOIT JAMAIS être humide.**

*Le matériau constituant le filtre ne peut pas être retiré du coude.*



6

Laver le bocal et son couvercle dans de l'eau chaude et un liquide vaisselle. Rincer avec de l'eau chaude.

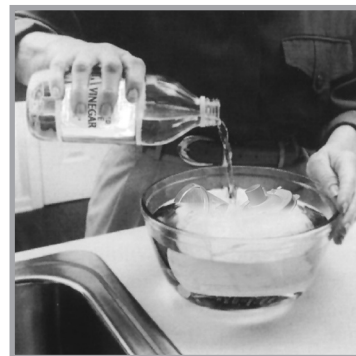

7

Plonger ensuite 60 minutes dans une solution composée d'un quart de vinaigre et de trois quarts d'eau chaude et laisser sécher.